



PATIËNTENINFORMATIE

Behandeling met Endo-SPONGE®

INLEIDING

Je endeldarm is gedeeltelijk of helemaal verwijderd. Helaas is er vervolgens een complicatie opgetreden, waardoor een holte is ontstaan die niet goed wil genezen. Dit komt doordat deze holte niet goed schoongespoeld kan worden. Om dit te verhelpen wordt je behandeld met een Endo-SPONGE® oftewel een spons in deze (darm)holte.

In deze folder lees je hoe dat gebeurt, wat het doel is en wat je verder nog moet weten.

HOE WERKT EEN ENDO-SPONGE®

Een Endo-Sponge® wordt in de holte ingebracht via je anus en is met een slangetje verbonden aan een vacuümpot (Redyrob®). Het vuil uit de darmholte komt via het slangetje terecht in de vacuümpot, die je bij je draagt. Op deze manier wordt de holte schoongehouden, wat het herstel bevordert. De spons wordt twee keer per week vervangen. Geleidelijk wordt de holte steeds kleiner, tot deze uiteindelijk dichtgroeit.

ZIEKENHUIS

Locatie

Melden bij

Datum / tijdstip

	uur
--	-----

Behandelaar

Telefoonnummer

BELANGRIJK

- Breng extra ondergoed en/of stomamateriaal mee.
- Je mag na de behandeling niet alleen naar huis gaan, zorg voor begeleiding.

VERZORGING THUIS

De uitleg krijgt je op de endoscopieafdeling en je kan indien nodig contact opnemen!

Je mag de vacuümpot (Redyrob®) thuis wisselen als deze vol is, of als de blauwe markering van de pot helemaal tot onderen is gedaald (wat betekent dat de pot niet meer vacuüm is).

Dit gaat als volgt:

1. Verschuif het klemmetje op de slang.
2. De slang zit nu dicht.
3. Draai de draaiknop naar 0.
4. Draai de verbinding tussen de slang en de pot los.
5. Bewaar de pot om deze mee te nemen bij de volgende behandeling en verpak deze in een afgesloten plastic zak.
6. **Verwijder het rode dopje van de Redyrob®.**
7. Sluit de Redyrob® aan op de slang.
8. Zet de draaiknop op stand 1.
9. Schuif het klemmetje van de slang los zodat de slang open is, nu zal de vloeistof langzaam gaan lopen.
10. Plak de slang vast op bil of been, zodat je mobiel bent en veilig kan bewegen.

BEHANDELING

VOORBEREIDING BIJ PLAATSEN EN WISSEL

Bij de afdeling dagverpleging krijgt je een infuus ingebracht. Als je komt om een Endo-SPONGE® te vervangen, krijgt je bij de dagverpleging een verdovende vloeistof in de huidige spons gespoten. Hierdoor gaat het verwijderen gemakkelijker. Een verpleegkundige van de endoscopieafdeling begeleidt je naar de behandelkamer. De voorbereiding duurt ongeveer een half uur.

PLAATSEN ENDO-SPONGE®

Tijdens de behandeling lig je op je linkerzijde. De maag-darm-leverarts (MDL-arts) dient via het infuus een roesje toe, waardoor de behandeling minder belastend voor je is. Het medicijn maakt je wat slaperig en vermindert je reactievermogen. De MDL-arts verwijdert de spons die al in de holte zit. Vervolgens wordt er een dunne camera via de anus naar binnen gebracht. Dit kan een drukkend gevoel of kramp veroorzaken omdat er lucht in de darm geblazen wordt.















De MDL-arts beoordeelt de holte en plaatst indien nodig direct een nieuwe spons. Het vacuüm in het wondgebied veroorzaakt soms een pijnlijk gevoel dat na enkele minuten afzwakt. De slang wordt vastgeplakt op je been of bil zodat je mobiel bent en veilig kan bewegen. Het plaatsen van de Endo-SPONGE® duurt 15 tot 20 minuten.

NA DE BEHANDELING

Een opgeblazen gevoel na de behandeling is heel normaal, winden laten helpt. Als je weer goed wakker bent bespreekt de arts zijn bevindingen.

VERVOLGBEHANDELING

De behandeling wordt in principe 2 keer per week herhaald. De behandeling met de Endo-SPONGE® varieert van een paar weken tot een paar maanden. Dit hangt af van de omvang van de holte en het tempo van het genezingsproces. De arts legt de behandeling aan je uit doormiddel van onderstaande illustraties.

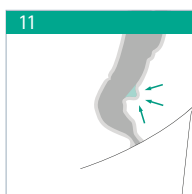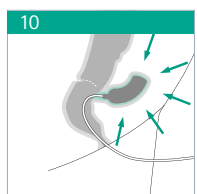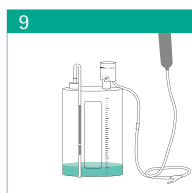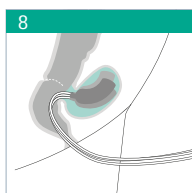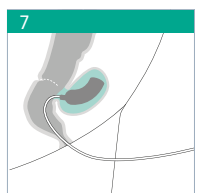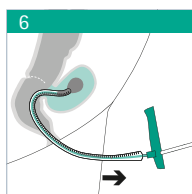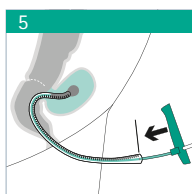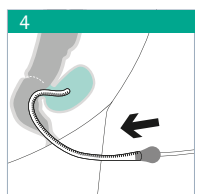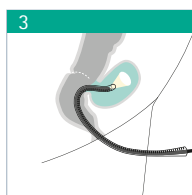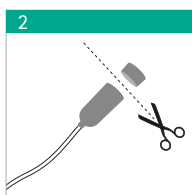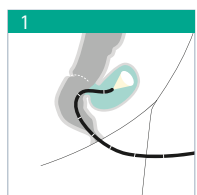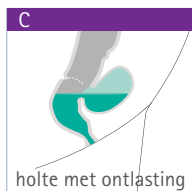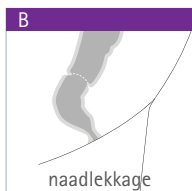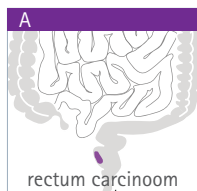

MOGELIJKE COMPLICATIES

Als je na de behandeling hevige buikpijn krijgt, of koorts boven de 38 graden, neem dan contact op met het ziekenhuis.

Nog vragen?

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen en/of opmerkingen, dan kan je terecht bij de endoscopieafdeling. De verpleegkundige en arts vertellen je tijdens het onderzoek steeds wat er gaat gebeuren. Je mag natuurlijk ook zelf vragen stellen, vooraf en na afloop.

Voor meer informatie kijk op www.bbraun.nl

Gegevens ziekenhuis (stempel):

Deze patiëntenfolder is ontwikkeld in samenwerking met:



zuyderland

B. Braun Medical B.V. | www.bbraun.nl