




VEILIG BEREIDEN
PROTECTIVE ADMIXTURE TOOLS

Veilig bereiden

Als professional in de gezondheidszorg heeft u producten nodig die gebruiksvriendelijk zijn en de veiligheid van u en uw patiënten waarborgen.

In een arbeidsintensieve en stressgevoelige omgeving moeten talrijke medicijnen snel bereid worden. Hierbij bestaat het gevaar van contaminatie en/of prikaccidenten.

B. Braun biedt een uitgebreid assortiment om bereidingen veiliger en eenvoudiger te maken.

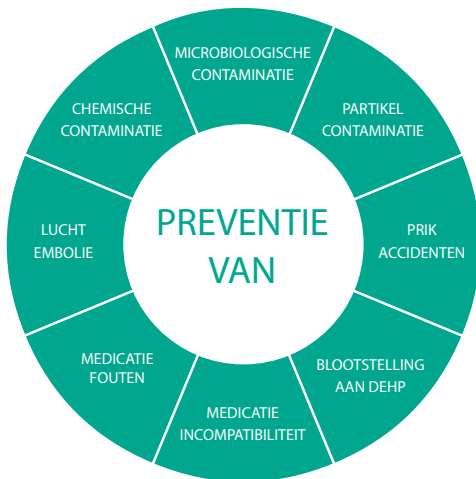


Index

Toebehoren bij het mengen van vloeistoffen

Ecoflac® Connect 

Ecoflac® Mix 

Transofix® 

Connector vr/vr Luer-lock 

Combifix® adapter 

MAC1001 Multi-Ad 

MAT 4100 Multi-Ad set 

Bereidingsrietjes en bereidingsnaalden


Sterifix® filterrietje 


Sterifix® injectiefilter 

Sterifix® Pury 


Sterifix® filternaald 

Sterican® Mix blunt 

Sterican® Mix semi-blunt 

Micro pin 

Bereidingsspikes

Mini-Spike® Groen 

Mini-Spike® Blauw 

Mini-Spike® Chemo 

Mini-Spike® 2 Groen 


Mini-Spike® 2 Blauw 

Mini-Spike® 2 Chemo 

Bereidingsspike Luer-lock met Safsite® 

Afsluitdoppen

Tec1000 afsluitdop Sc2000 

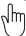Afsluitdop Luer-lock SCF 

Afsluitdop 

Combi-stopper 

Puresite Connector & Cap 

Koppelsystemen cytostatica

Cyto-set® Mix 



Ecoflac® Connect




| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| Artikelnr. | 4090549 | 4090550 | 4090552 |
| Z-indexnr. | 16756592 | 15600416 | 16756622 |
| Maat | S | M | L |
| Min. bestelh. | 50 | 50 | 50 |
| Verpakking | 1x50 | 1x50 | 1x50 |

Wat is Ecoflac® Connect?

Een transferkap voor een gesloten overdracht van vloeistoffen tussen een Ecoflac® container en een flacon. Het reduceert een groot aantal stappen in de bereiding. Ecoflac® Connect wordt éénmalig aangesloten op Ecoflac®. De transferkap is verkrijgbaar in drie maten.

Wat zijn de voordelen?

- Naadloze bereiding
> geen prikaccidenten
- Gesloten systeem
> voorkomt chemische- en microbiologische contaminatie
> geeft een stabiele connectie
- Geneesmiddelflacon kan aangesloten blijven
> minimaliseert medicatiefouten
- Geïntegreerd ventiel
> geen lekkage
- Kortere bereidingstijd
> economisch voordelig

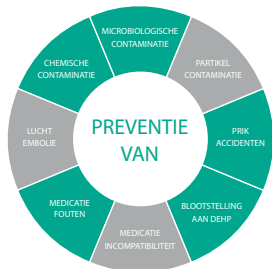



Ecoflac® Mix




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 16401 |
| Z-indexnr. | 14992043 |
| Min. bestelh. | 250 |
| Verpakking | 1x250 |

Wat is Ecoflac® Mix?

Transferset voor het mengen van vloeistoffen. Na het mengen kan Ecoflac® Mix verwijderd worden.

Wat zijn de voordelen?

- Speciaal ontworpen voor Ecoflac®
> geeft een stabiele connectie
- Naaldloze bereiding
> geen prikaccidenten
- Kortere bereidingstijd
> economisch voordelig

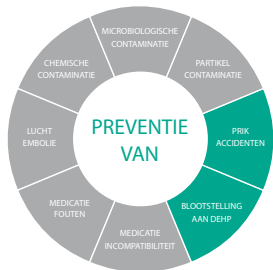



Transofix®




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 4090500 |
| Z-indexnr. | 14615592 |
| Min. bestelh. | 50 |
| Verpakking | 1x50 |

Wat is Transofix®?

Een transferspike geschikt voor het snel en lekvrij mengen van steriele vloeistoffen en/of oplossingen van medicatie in poedervorm.

Wat zijn de voordelen?

- Grote interne diameter
> maakt een hoge flow mogelijk
- Naaldloze bereiding
> geen prikaccidenten

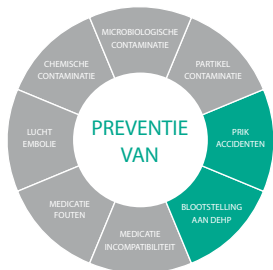



Connector vr/vr Luer-lock




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 415080 |
| Z-indexnr. | 15986004 |
| Min. bestelh. | 100 |
| Verpakking | 1x100 |

Wat is Connector vr/vr Luer-lock?

De connector maakt een veilige en goede verbinding tussen twee spuitjes mogelijk. Kleine spuitjes kunnen daardoor bijvoorbeeld eenvoudig met een grote spuit uitgevuld worden.

Wat zijn de voordelen?

- Luer-lock aansluiting aan beide zijden
> veilige en goede verbinding
- Veilige ontluchting van de spuit
> lucht bevindt zich altijd in het bovenste gedeelte van de spuit.
- Ergonomische grip
> eenvoudig in gebruik

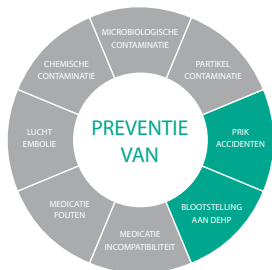



Combifix® adapter



| | | | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Artikel omschrijving | vrouwelijk/ vrouwelijk | mannelijk/ mannelijk | vrouwelijk/ rekord |
| Artikelnr. | 5206634 | 5206642 | 4090306 |
| Z-indexnr. | 14618737 | 14618745 | 14997606 |
| Min. bestelh. | 100 | 100 | 100 |
| Verpakking | 1x100 | 1x100 | 1x100 |

Wat is Combifix® adapter vrouwelijk/vrouwelijk?

Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen twee mannelijke aansluitingen.

Wat is Combifix® adapter mannelijk/mannelijk?


Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen twee vrouwelijke aansluitingen.

Wat is Combifix® adapter vrouwelijk/rekord?

Combifix® adapter maakt een verbinding mogelijk tussen een mannelijke Luer-lock en een rekord aansluiting.

Wat zijn de voordelen?

- Diversiteit aan adapters
 - > maakt alle combinaties mogelijk

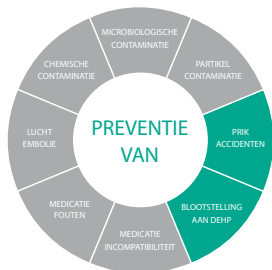



Multi-Ad Fluid Dispensing System



| | | |
|----------------------|--|-----------------------|
| Artikel omschrijving | MAC1001 Multi-Ad Fluid dispensing system | MAT 4100 Multi-Ad set |
| Artikelnr. | 513506 | 513548 |
| Z-indexnr. | - | 14999021 |
| Min. bestelh. | 10 | 20 |
| Verpakking | 1x10 | 1x20 |

Wat is MAC1001 Multi-Ad Fluid Dispensing System?

Gesloten systeem voor het uit- en afvullen.

Wat zijn de voordelen?


- Identieke volumes kunnen snel herhaald worden
> maakt het teruggaan naar de eerder ingestelde waarden mogelijk
- Ergonomische grip
> eenvoudig in gebruik
- Gesloten verbinding en terugslagventiel
> minimaliseert microbiologische contaminatie

Wat is MAT 4100 Multi-Ad set?

Gesloten systeem voor het uit- en afvullen.

Wat zijn de voordelen?

- Gesloten verbinding en terugslagventiel
> minimaliseert microbiologische contaminatie

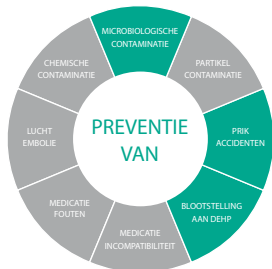



Sterifix® filterrietje




| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| Artikelnr. | 4550250 | 4550200 |
| Z-indexnr. | 15600858 | 15599957 |
| Filter | 5 m μ | 5 m μ |
| Lengte | 4,5 cm | 10 cm |
| Min. bestelh. | 200 | 200 |
| Verpakking | 4x50 | 4x50 |

Wat is Sterifix® filterrietje?

Sterifix® filterrietje is het ideale product voor het werken met glasampullen. Bij het openbreken van glasampullen komen er glaspartikels in de ampul terecht. Sterifix® filterrietje voorkomt dat deze toegediend worden. Een mooi systeem om medicatie uit glasampullen te filtreren.

Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
> minimaliseert glaspartikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- In twee lengtes verkrijgbaar
> ook geschikt voor kleine glasampullen
- Rietje is buigzaam
> geschikt om met ampul in de hand te aspireren

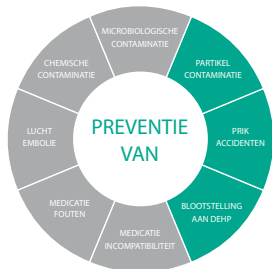



Sterifix® filter




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 4099206 |
| Z-indexnr. | 14615495 |
| Filter | 0,2 µm |
| Min. bestelh. | 200 |
| Verpakking | 4x50 |

Wat is Sterifix® filter?

Sterifix® filter (tolletje) is voorzien van een 0,2 µm bacteriefilter en Luer-lock aansluitingen. Het wordt gebruikt bij het uitvullen van vloeistoffen.

Wat zijn de voordelen?

- Bacteriefilter 0,2 µm
 - > minimaliseert microbiologische contaminatie

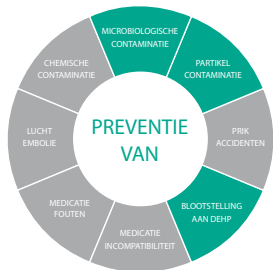



Sterifix® Pury




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 4551001 |
| Z-indexnr. | 14615509 |
| Filter | 5 µm |
| Min. bestelh. | 100 |
| Verpakking | 1x100 |

Wat is Sterifix® Pury?

Sterifix® Pury 5 µm partikelfilter wordt gebruikt bij het aspireren of injecteren van vloeistoffen. Het filter houdt de partikels groter dan 5 µm tegen. Bij het uitvullen moet Sterifix® Pury worden verwijderd, zodat partikels niet mee de oplossing in gaan.

Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
 - > minimaliseert partikelcontaminatie
- Luer-lock aansluiten
 - > kan begruikt worden bij het aspireren met een Sterican® Mix Blunt of Sterican® Mix Semi-blunt naald

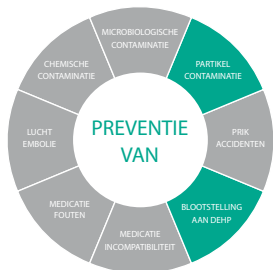



Sterifix® filternaald




| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnr. | 4550404 |
| Z-indexnr. | 14616149 |
| Filter | 5 μ m |
| Lengte | 2,5 cm |
| Min. bestelh. | 50 |
| Verpakking | 1x50 |

Wat is Sterifix® filternaald?

Sterican® filternaald wordt gebruikt voor het aspireren of injecteren van medicatie. Het filter houdt de partikels groter dan 5 µm tegen.


Wat zijn de voordelen?

- Partikelfilter 5 µm
> minimaliseert partikelcontaminatie

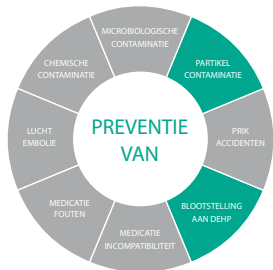



Sterican® Mix Blunt

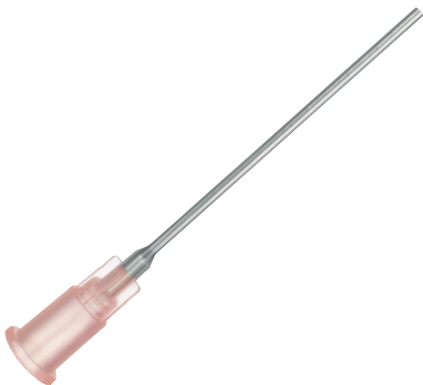


| | |
|---------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | 4038088-01 |
| Z-indexnr. | 15861333 |
| Maat | 1,20 x 40mm 18g x 1 ^{1/2} |
| Min. bestelh. | 1000 |
| Verpakking | 10x100 |

Wat is Sterican® Mix Blunt?

Sterican® Mix Blunt is een volledig stompe naald voor het optrekken van medicatie.

Wat zijn de voordelen?

- Stompe naald
> voorkomt prikaccidenten
- Sterican® Mix Blunt wordt gebruikt met Sterifix® Pury
> deze combinatie voorkomt prikaccidenten en partikelcontaminatie

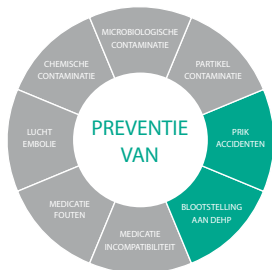



Sterican® Mix semi-blunt




| | |
|---------------|------------------------------------|
| Artikelnr. | 4550400-01 |
| Z-indexnr. | 15861333 |
| Maat | 1,20 x 40mm 18g x 1 ^{1/2} |
| Min. bestelh. | 1000 |
| Verpakking | 10x100 |

Wat is Sterican® Mix semi-blunt?

Sterican® Mix semi-blunt is een half stompe naald voor het bereiden van medicatie.

Wat zijn de voordelen?

- Half stompe naald
> minimaliseert prikaccidenten
- Sterican® Mix semi-blunt wordt gebruikt met Sterifix® Pury
> deze combinatie minimaliseert prikaccidenten en voorkomt partikelcontaminatie

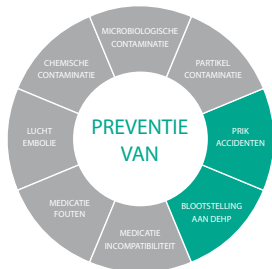



Micro-pin



| | | |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Art. omschrijving | VN1000 belucht | VN1000L onbelucht |
| Artikelnr. | 415070 | 415072 |
| Z-indexnr. | 14997584 | 16068823 |
| Min. bestelh. | 100 | 100 |
| Verpakking | 1x100 | 1x100 |

Wat is Micro-pin VN1000 belucht?

Beluchte Micro-pin is een kunststof naald voor het injecteren of aspireren van vloeistoffen.

Wat zijn de voordelen?


- Naadloos werken
> voorkomt prikaccidenten
- Beluchte Micro-pin
> reguleert drukverschillen in de flacon

Wat is Micro-pin VN1000L onbelucht?

Onbeluchte Micro-pin is een kunststof naald voor het injecteren of aspireren van vloeistoffen.

Wat zijn de voordelen?

- Naadloos werken
> minimaliseert het risico op prikaccidenten

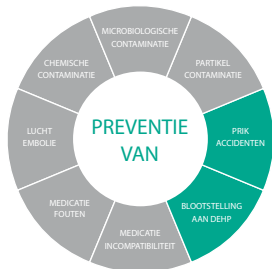



Mini-Spike® Groen




| | | | |
|---------------|----------|-----------|----------|
| Artikelnr. | 4550242 | 4550510 | 4550560 |
| Z-indexnr. | 14618834 | 14678012 | 14888068 |
| Specificatie | - | micro-tip | ventiel |
| Min. bestelh. | 100 | 100 | 100 |
| Verpakking | 2x50 | 2x50 | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® Groen?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm
> reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
> minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
> speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
> voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

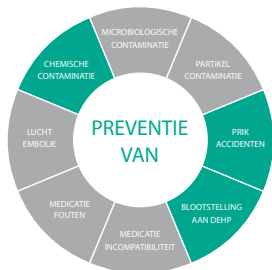



Mini-Spike® Blauw




| | | | |
|---------------|----------|----------|------------------|
| Artikelnr. | 4550234 | 4550579 | 4550560 |
| Z-indexnr. | 14618826 | 14888076 | 14678004 |
| Specificatie | filter | filter v | filter micro-tip |
| Min. bestelh. | 100 | 100 | 100 |
| Verpakking | 2x50 | 2x50 | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® Blauw?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm en partikelfilter 5 µm
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
 - > minimaliseert partikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
 - > voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

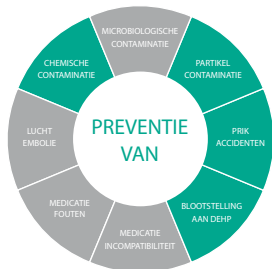



Mini-Spike® Chemo




| | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| Artikelnr. | 4550340 | 4550536 | 4550587 |
| Z-indexnr. | 14618842 | 14678020 | 14888084 |
| Specificatie | chemo | chemo micro-tip | chemo v |
| Min. bestelh. | 100 | 100 | 100 |
| Verpakking | 2x50 | 2x50 | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® Chemo?

Mini-Spike® wordt gebruikt bij bereiden van medicatie. Het kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Aerosolfilter 0,2 µm
 - > voorkomt het vrijkomen van aerosolen
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials
- Beschikbaar met ventiel
 - > voorkomt lekkage bij een omgekeerde container

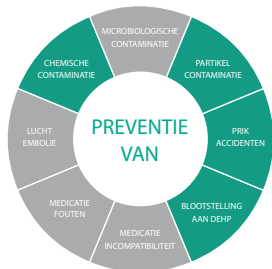



Mini-Spike® 2 Groen




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 4550590 |
| Z-indexnr. | 16068904 |
| Min. bestelh. | 100 |
| Verpakking | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® 2 Groen?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® 2 met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm
> reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
> voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
> creëert een gesloten systeem
> voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
> minimaliseert chemische contaminatie

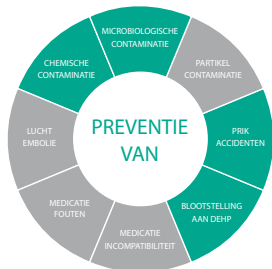



Mini-Spike® 2 Blauw




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 4550591 |
| Z-indexnr. | 16068912 |
| Min. bestelh. | 100 |
| Verpakking | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® 2 Blauw?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Luchtfilter 0,45 µm en partikelfilter 0,5 µm
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
 - > minimaliseert partikelcontaminatie
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
 - > creëert een gesloten systeem
 - > voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemisch contaminatie

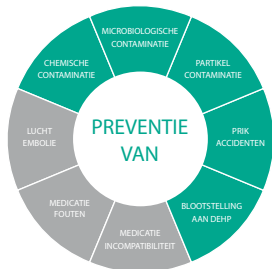



Mini-Spike® 2 Chemo




| | | |
|---------------|----------|-----------------|
| Artikelnr. | 4550592 | 4550595 |
| Z-indexnr. | 16068920 | |
| Specificatie | chemo | chemo micro-tip |
| Min. bestelh. | 100 | 100 |
| Verpakking | 2x50 | 2x50 |

Wat is Mini-Spike® 2 Chemo?

Mini-Spike® 2 biedt een gesloten systeem dankzij de geïntegreerde Safeflow. Mini-Spike® 2 met Safeflow kan aangesloten blijven op de flacon en zo meerdere malen gebruikt worden bij één flacon.

Wat zijn de voordelen?

- Aerosolfilter 0,2 µm
 - > voorkomt het vrijkomen van aerosolen
 - > reguleert drukverschillen in de flacon
- Naaldloze bereiding
 - > voorkomt prikaccidenten
- Geïntegreerde Safeflow
 - > creëert een gesloten systeem
 - > voorkomt lekkage bij omgekeerde container
- Brede gripplaat
 - > minimaliseert chemische contaminatie
- Beschikbaar met micro-tip
 - > speciaal voor de kleinste vials

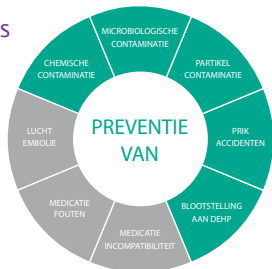



Bereidingsspike Luer-lock




| | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|
| Art. omschrijving | DP3500L onbelucht | DP2500L belucht |
| Artikelnr. | 413501 | 412006 |
| Z-indexnr. | 14618702 | 14618680 |
| Min. bestelh. | 50 | 50 |
| Verpakking | 1x50 | 1x50 |

Wat is Bereidingsspike Luer-lock met Safsite®?

Een high flow bereidingsspike met geïntegreerd Safsite® 2-weg ventiel voor herhaald injecteren en aspireren van vloeistoffen. Verkrijgbaar zonder beluchting voor infuuszakken en flexibele kunststof containers en met beluchting voor glazen flessen.

Wat zijn de voordelen?

- Het grote lumen van de spike
>garandeert een snelle vloeistofdoorstroming
- Luer-lock aansluiting met een kraag
> minimaliseert chemische contaminatie
- Het Safsite® 2-weg ventiel voorkomt lekkage
> speciaal bij omgekeerde containers

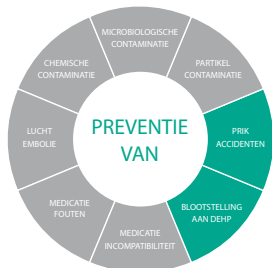



TEC1000 afsluitdop




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 418004 |
| Z-indexnr. | 15007553 |
| Min. bestelh. | 500 |
| Verpakking | 50x10 |

Wat is TEC1000 afsluitdop?

Tweedelige afsluitdop voor het veilig afsluiten van spuiten.

Wat zijn de voordelen?

- Transparante kap
 - > de kap wordt afgebroken bij ingebruikname van de spuit en kan niet meer teruggeplaatst worden
 - > hiermee kan vastgesteld worden of de Luer-lock spuit gebruikt of gemanipuleerd is
- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
 - > dop is met één hand te bevestigen
- Voorzien van een schroefdraad
 - > maakt een „lock“ verbinding mogelijk

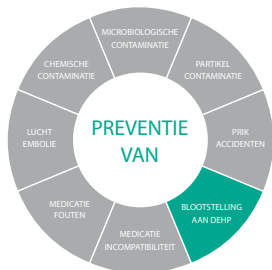



SC2000 afsluitdop Luer-lock




| | |
|---------------|----------|
| Artikelnr. | 418012 |
| Z-indexnr. | 16062949 |
| Min. bestelh. | 500 |
| Verpakking | 50x10 |

Wat is SC2000 afsluitdop Luer-lock?

Afsluitdop voor het afsluiten van spuiten.

Wat zijn de voordelen?

- Voorzien van een schroefdraad
 - > maakt een „lock“ verbinding mogelijk
 - > zowel bij Luer-tip als bij Luer-lock spuiten te gebruiken
- De buitenrand van de dop is vierkant
 - > de spuiten kunnen niet van de tafel rollen en ook staand worden teruggezet
- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
 - > de dop is met één hand te bevestigen

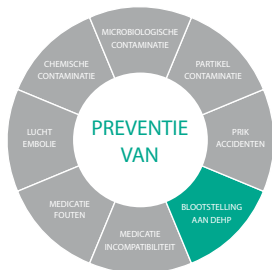



SCF afsluitdop




| | | |
|-------------------|----------|----------|
| Art. omschrijving | SCF130 | SCF230 |
| Artikelnr. | 418200 | 418202 |
| Z-indexnr. | 14618788 | 14618761 |
| Kleur | wit | blauw |
| Min. bestelh. | 600 | 600 |
| Verpakking | 20x30 | 20x30 |

Wat is SCF afsluitdop?

Een afsluitdop voor het afsluiten van spuiten.

Wat zijn de voordelen?

- De blisterverpakking zorgt voor stabiliteit
> de dop is met één hand te bevestigen
- Geen schroefdraad
> maakt snel afdoppen mogelijk
> geschikt voor Luer-lock en Luer-tip spuiten
- De blisterverpakking zorgt voor steriliteit bij de ongeopende dopjes
> minder verspilling

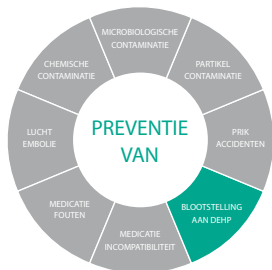



Combi-stopper




| | | | |
|---------------|----------|----------|----------|
| Artikelnr. | 4495101 | 4495152 | 4495209 |
| Z-indexnr. | 14615541 | 14615533 | 14615568 |
| Kleur | rood | blauw | wit |
| Min. bestelh. | 1000 | 1000 | 1000 |
| Verpakking | 10x100 | 10x100 | 10x100 |

Wat is Combi-stopper?

Combi-stopper is de afsluitdop om zowel vrouwelijk als mannelijk Luer-lock aansluitingen af te sluiten.

Wat zijn de voordelen?

- Aan twee zijden te gebruiken
> altijd in te zetten
- Multifunctioneel ontwerp
> Luer-lock en Luer-slip aansluitingen mogelijk

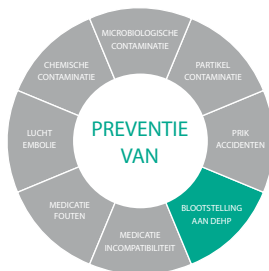



PureSite Connector & Cap




| | | |
|-------------------|-----------|----------|
| Art. omschrijving | Connector | Cap |
| Artikelnr. | 4551105 | 4551101 |
| Z-indexnr. | 16637593 | 16068890 |
| Min. bestelh. | 200 | 200 |
| Verpakking | 2x100 | 2x100 |

Wat zijn PureSite Connector en PureSite Cap?

PureSite Connector biedt een permanente connectie en daarmee een goede bescherming tegen chemische en microbiologische contaminatie tijdens bereiden, transport en toedienen van medicatie. PureSite Cap is speciaal voor het afsluiten van PureSite Connector.

Wat zijn de voordelen?

- Permanente connectie met de vrouwelijke Luer-lock op een spuit of infuussysteem
 - > minimaliseert chemische en microbiologische contaminatie
 - > voorkomt losraken tijdens vervoer
- Gesloten systeem met de mannelijke Luer-lock
 - > opent bij connectie en sluit automatisch bij het ontkoppelen

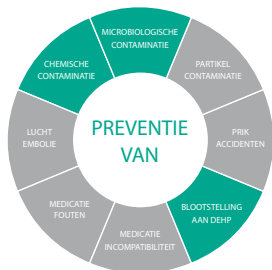



Cyto-Set® Mix




| | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|
| Artikelnr. | A2582NF | A2900N | A2903N | A2906N |
| Z-indexnr. | 16756657 | 16756665 | 16756703 | 16756711 |
| Valve | - | 1xfnf | 1xfnf | 1xfnf |
| Filter | 0,2 µm | - | 0,2 µm | - |
| UV-protect | - | - | - | ■ |
| Primestop | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Min. bestelh. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Verpakking | 1x20 | 1x20 | 1x20 | 1x20 |

Wat is Cyto-Set® Mix?

Cyto-Set® Mix is een koppelsysteem voor het veilig en naaldvrij bereiden en toedienen van cytostatica.

Wat zijn de voordelen?

- Naaldvrij werken
> voorkomt prikaccidenten
- Voorzien van Primestop
> voorkomt chemische contaminatie
- Beschikbaar met UV-protect
> beschermt lichtgevoelige medicatie

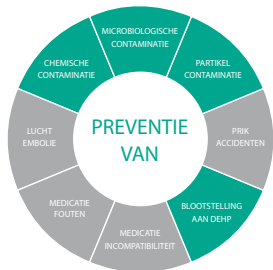

CONTACT

customercare.nl@bbraun.com

+31 (0)412 67 24 11

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11
customercare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl