


# Actreen® Hi-Lite Set

No-touch principe op verschillende manieren

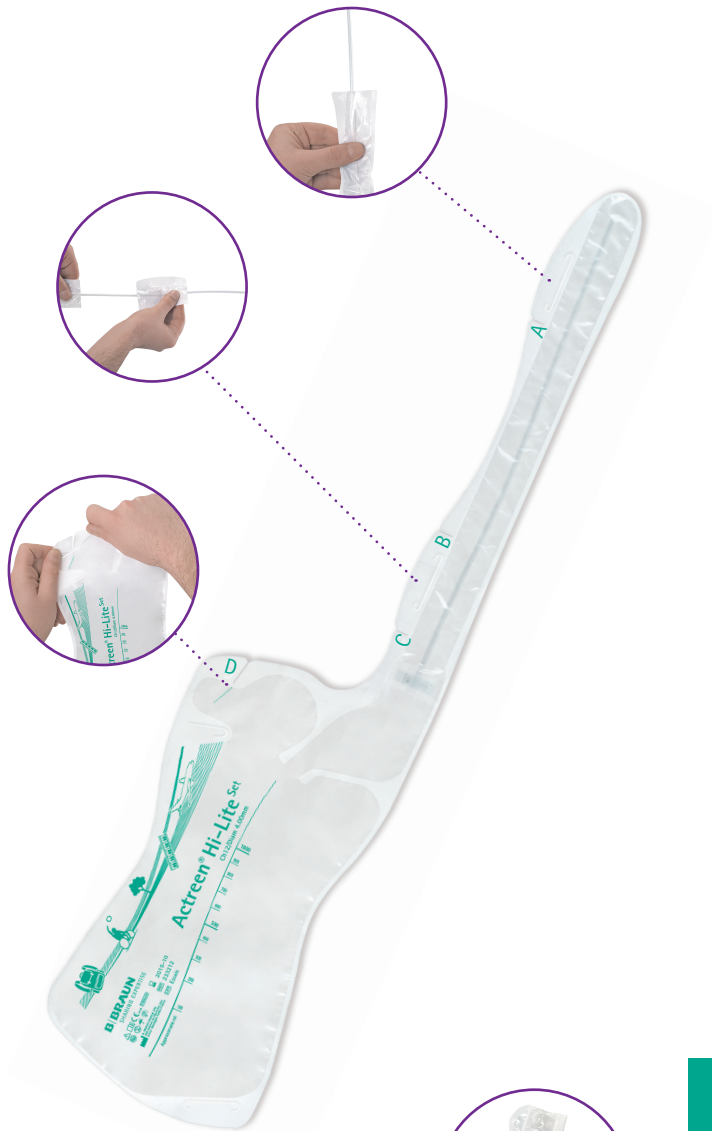

Vouw mij op! Je kan mij ongezien meenemen in je sok.



VERRASSEND  
PRAKTISCH

## Gebruiksaanwijzing Actreen® Hi-Lite Set

Enmalige katheter voor mannen met opvangzak


B. Braun Medical B.V.

+31 412 67 24 11 | [homecare.nl@bbraun.com](mailto:homecare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.

# Actreen® Hi-Lite Set


## Gebruiksaanwijzing

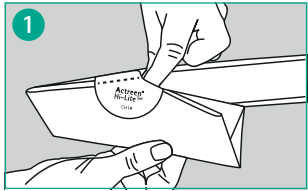

1 Was zorgvuldig je handen. Verwijder de sticker en vouw de set open.


Er zijn drie opties om de katheter te gebruiken:

- 2a. No-touch harmonica methode
- 2b. No-touch schuifmethode
- 2c. Katheter helemaal uit de verpakking halen

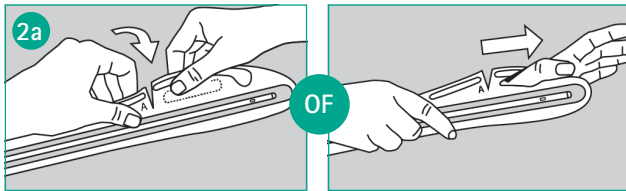


### No-touch harmonica methode

- **Optie 1:** Pak de verpakking vast bij markering [A] en scheur de verpakking open.
- **Optie 2:** Houd de katheter met één hand vast en steek je duim van de andere hand in de opening bij markering [A] en trek de verpakking open.

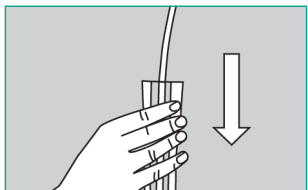


Vervolgens schuif je de verpakking naar beneden als een harmonica zonder de katheter aan te raken. Gebruik de verpakking als geleider om te sturen bij het inbrengen (no-touch).

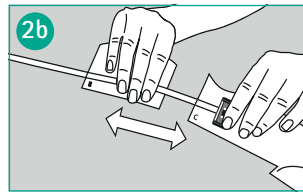



### No-touch schuifmethode

Scheur de verpakking open bij markering [B] en [C]. Je kan de verpakking nu verplaatsen. Gebruik de verpakking als geleider om te sturen bij het inbrengen (no-touch).

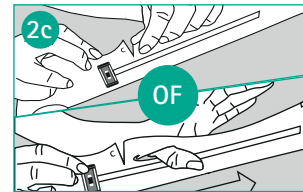

### Katheter helemaal uit de verpakking halen

Scheur of trek de verpakking open bij markering [C] en haal de katheter helemaal uit de verpakking. Raak de katheter niet aan, pak vast bij de connector.

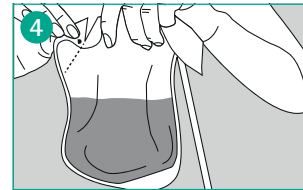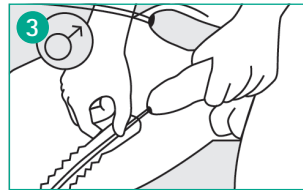

### Inbrengen van de katheter

- Houd met één hand je penis omhoog om de kromming van de urinebuis te verminderen.
- Breng met je andere hand voorzichtig de katheter in de plasbuis tot deze de blaas bereikt en de urine begint te stromen. Ervaar je weerstand bij het inbrengen? Breng dan je penis iets naar beneden.
- Gebruik je een Tiemann katheter: breng de katheter in met de markering op de connector naar boven, de gebogen tip wijst naar boven.
- Druk zacht op je onderbuik. Wacht tot de urine stopt met stromen. Trek de katheter voorzichtig uit de plasbuis.
- Leeg de opvangzak voordat je de set weggooit. Scheur de opvangzak open langs scheurlijn [D] aan de zijkant en laat de urine weglopen.
- Vouw de katheter naar binnen en rol de opvangzak op. Plak de set dicht met de sticker.
- Gooi de set weg bij het plastic afval, deze is recyclebaar.
- Was zorgvuldig je handen.

# Actreen® Hi-Lite Set

## Productinformatie

### Actreen® Hi-Lite Set Nelaton tip (recht)

Maat	Aantal	Artikelnr.	Z-Indexnr.
■ CH10	30 stuks	242210K	16369785
□ CH12	30 stuks	242212K	16369793
■ CH14	30 stuks	242214K	16369807
■ CH16	30 stuks	242216K	16369815
■ CH18	30 stuks	242218K	16369823

### Actreen® Hi-Lite Set Tiemann tip (gebogen)

Maat	Aantal	Artikelnr.	Z-Indexnr.
■ CH10	30 stuks	242110K	16369726
□ CH12	30 stuks	242112K	16369734
■ CH14	30 stuks	242114K	16369742
■ CH16	30 stuks	242116K	16369750
■ CH18	30 stuks	242118K	16369769

PSST... ik ben er ook zonder opvangzak!



### Actreen® Hi-Lite Cath Nelaton tip (recht)

Maat	Aantal	Artikelnr.	Z-Indexnr.
■ CH8	30 stuks	238208K	15832163
■ CH10	30 stuks	238210K	15832171
□ CH12	30 stuks	238212K	15832198
■ CH14	30 stuks	238214K	15832201
■ CH16	30 stuks	238216K	15832228

### Actreen® Hi-Lite Cath Tiemann tip (gebogen)

Maat	Aantal	Artikelnr.	Z-Indexnr.
■ CH8	30 stuks	238108K	15832236
■ CH10	30 stuks	238110K	15832252
□ CH12	30 stuks	238112K	15832260
■ CH14	30 stuks	238114K	15832279
■ CH16	30 stuks	238116K	15832295