

Ecoflac® Connect

Gebruikersinstructie

3 MATEN, 1 GEBRUIKERSINSTRUCTIE
Op deze poster is Ecoflac® Connect M gebruikt

1 Plaats Ecoflac® Connect



- Verwijder de beschermfolie van een van de steriele poorten van de Ecoflac® container. Desinfectie is niet nodig.
- Plaats de Ecoflac® op een stabiele ondergrond bij het bevestigen van de Ecoflac® Connect en het infuussysteem.
- Plaats de vingers op de daarvoor bestemde plek op de Ecoflac® Connect.
- Gebruik de opening voor het infuussysteem als kijkvenster om de spike van de Ecoflac® Connect recht op de poort te plaatsen. Gebruik daarbij niet teveel kracht.

2 Plaats de flacon



- Desinfecteer de flacon en plaats deze op de Ecoflac® Connect. Een klik geeft aan dat de verbinding goed is.

- Ecoflac® Connect S past op een flacon Ø 13 mm
- Ecoflac® Connect M past op een flacon Ø 20 mm
- Ecoflac® Connect L past op een flacon Ø 32 mm

3 Mengen



- Draai de container om en knijp er in om het geneesmiddel op te lossen.
- Herhaal deze stap tot er voldoende vloeistof in de flacon is gelopen.

4 Verdunnen



- Draai het geheel weer om en breng door middel van knijpen het geneesmiddel terug in de container.
- Controleer en etiketteer de bereiding.
- Stap 3 en 4 kunnen meerdere keren herhaald worden.

5 Sluit het infuussysteem aan



- Verwijder de tweede beschermfolie en plaats de container op een stabiele ondergrond.
- Prik de spike van het infuussysteem in de andere poort.
- De flacon kan tijdens de infusie aangesloten blijven.

