

# Fixatie van Introcan Safety<sup>®</sup> Deep Access

## Standaard techniek

Het correct aanbrenge van het fixatiemateriaal is essentieel om ervoor te zorgen dat de katheter goed op zijn plaats blijft. Hier afgebeeld met 3M Tegaderm Periheral Line IV Dressing (1633).



### Stap 1

Verwijder voor het aanprikken de middelste uitsparing van het afdekverband en bewaar de steriele strips. Plaats na het aanprikken één strip over de 'body' of 'hub' van de katheter.



### Stap 2

Verwijder de bescherm laag van het afdekverband zodat de kleeflaag van de folie zichtbaar wordt. Plaats het verband zo over de katheter dat de transparante folie over de insteekplaats ligt, zodat deze duidelijk zichtbaar is en de randen (frame) van het verband onder de naaldloze connector liggen.



### Stap 3

Verwijder het papier van het frame. Maak de randen glad voor een goede hechting op de huid.



### Stap 4

Fixeer met een extra strip de naaldloze connector zo, dat de strip niet over het transparante verband geplakt wordt. Dit zou tijdens het gebruik de katheter kunnen destabiliseren. Noteer tenslotte datum en tijd op de datumstrook en breng deze aan op de rand van het verband.

Gauge (G)	Lengte (mm)	Ø (mm)	Gravity flow rate (ml/min)	Power injectie flow rate (viscositeit contrastvloeistof = mPa's = 2,3; 27,5)	Artikelnummer
18	64	1,3	85	19; 15	4251620-01
20	64	1,1	51	13; 8	4251621-01
22	64	0,9	24	7; 3	4251622-01
24	32	0,7	17	5; 25	4251623-01

# Fixatie van Introcan Safety<sup>®</sup> Deep Access


## Cross tape techniek

Het correct aanbrengen van het fixatiemateriaal is essentieel om ervoor te zorgen dat de katheter goed op zijn plaats blijft. Hier afgebeeld met 3M Tegaderm Periheral Line IV Dressing (1633).



### Stap 1

Verwijder voor het aanprikken de middelste uitsparing van het afdekverband en bewaar de steriele strips. Plaats na het aanprikken één strip diagonaal over de 'body' of 'hub' van de katheter, gevolgd door de tweede strip om ze een "X"- vorm te creëren. Zorg dat de insteekplaats niet wordt afgedekt.

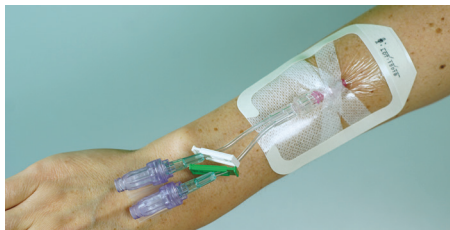

### Stap 2

Verwijder de bescherm laag van het afdekverband zodat de kleeflaag van de folie zichtbaar wordt. Plaats het verband zo over de katheter dat de transparante folie over de insteekplaats ligt, zodat deze duidelijk zichtbaar is en de randen (frame) van het verband onder de naadloze connector liggen.







### Stap 3

Verwijder het papier van het frame. Maak de randen glad voor een goede hechting op de huid.



### Stap 4

Fixeer met een extra strip de naadloze connector zo, dat de strip niet over het transparante verband geplakt wordt. Dit zou tijdens het gebruik de katheter kunnen destabiliseren. Noteer tenslotte datum en tijd op de datumstrook en breng deze aan op de rand van het verband.

Gauge (G)	Lengte (mm)	Ø (mm)	Gravity flow rate (ml/min)	Power injection flow rate (Viscositeit contrastvloeistof = mPa's = 2,3; 27,5)	Artikelnummer	
	18	64	1,3	85	19; 15	4251620-01
	20	64	1,1	51	13; 8	4251621-01
	22	64	0,9	24	7; 3	4251622-01
	24	32	0,7	17	5; 25	4251623-01

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.