

Intrafix® Safeset Flush

Infuus set voor een efficiënte toediening van medicatie

- 1** KLAARMAKEN VAN DE LANGE ZIJLEIDING (PER 24U VERVANGEN) MET SPOELZAK 150ML (5 TOEDIENINGEN / 24U)




Sluit de luchtinlaat en de rolklem van de infuustrousse voor het aanprikken van de infuuszak.

1. Breng de spike van de lange zijleiding in de infuuszak.
2. Vul de druppelkamer tot aan de groene ring.
3. Open de rolklem.
4. Purgeer de infuusset.

Opmerking: handhygiëne is voldoende, handschoenen zijn niet nodig.

- 2** CONNECTEER DE KORTE ZIJLEIDING (BIJ ELKE NIEUWE TOEDIENING EEN NIEUWE ZIJLEIDING!)

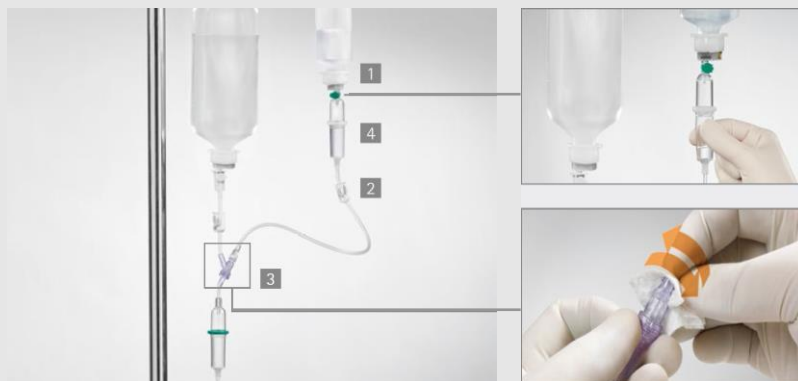

1. Breng de spike van de de korte zijleiding in de medicatie.
2. Sluit de witte klem.
3. Ontsmet de naaldloze connector op de lange zijleiding gedurende min. 15 sec. met een Clinell Swab en connecteer de korte zijleiding op de naaldloze connector van de lange zijleiding.
4. Vul de druppelkamer.
5. Het is niet nodig om de korte zijleiding te spoelen.

- 3** START DE TOEDIENING



1. Sluit de witte klem van de lange zijleiding.
2. Open de witte klem van de korte zijleiding.
3. Stel de juiste infuussnelheid in met de rolklem.

- 4** EINDE VAN DE TOEDIENING



1. Sluit de witte klem van de korte zijleiding als de infuusvloestof volledig is ingelopen.
 2. Open de witte klem van de lange zijleiding en spoel de hoofdleiding gedurende 25 seconden voor 20ml te infuseren (simulatie : 20Gx25mm), verwijder terwijl de korte zijleiding en deponneer in de grote gele container.
 3. Na 24u gebruik van de lange zijleiding mag deze in de blauwe container gegooid worden indien de spike in de achterkant van de rolklem geplaatst is.
- Opmerking :** Controleer altijd het vloeistof niveau in de druppelkamer en indien nodig hervul het vloeistofniveau tot aan de groene ring.