

Softima® Key colo en ileo

Gebruikersinstructie

Een 2-delig stomaopvangsysteem met een uniek geïntegreerd geleidingsstelsel voor correcte plaatsing van het zakje op de huidplaat.

Productomschrijving

- Een huidplaat met zachte flens en geleiding (sleutelgat) voor de juiste positionering en bevestiging van het zakje.
- Een opvangzakje met geïntegreerd geleidingstabje (sleutel) om gemakkelijk en correct het zelfklevende zakje op de huidplaat te bevestigen.

Vorbereiding materiaal

- Knip de huidplaat op de juiste maat van de stoma. De huidplaat mag de stoma niet afklemmen! Knip de opening in de huidplaat daarom een fractie groter dan de stoma.

Vorbereiding huid rondom de stoma


- Reinig de huid rondom de stoma met lauw water en droog de huid voorzichtig.
- Gebruik geen alcohol, ether of andere desinfecterende middelen!

Aanbrengen van de huidplaat

- Verwijder de beschermlaag van de huidplaat.
- Plaats de huidplaat over de stoma en zorg ervoor dat de geleider (het sleutelgat) naar beneden zit.
- Plak de huidplaat vast door deze vanaf de stoma richting buitenrand aan te wrijven.

Aanbrengen van het zakje

- Verwijder de beschermlaag van de kleeflaag. Zorg ervoor dat de flens schoon en droog is.
- Schuif het tabje (de sleutel) van het zakje in de geleider (sleutelgat) van de flens. ① *Let op:* vermijd tijdens het inschuiven aanraking met de plaklaag van het zakje en contact van deze plaklaag met de flens.
- Leg vervolgens, van onder naar boven, het zakje geleidelijk op de flens en wrijf de kleefrand vanaf de stoma richting de buitenrand goed aan. ② ③

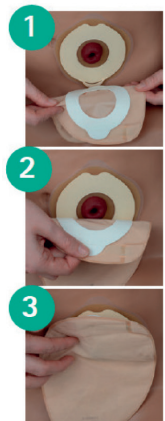

Verwijderen van het zakje

- Houd de huidplaat met een hand vast aan de bovenzijde en trek met de andere hand het zakje richting onderzijde los.

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 672 411 | homecare.nl@bbraun.com | www.bbraun.nl

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn. De genoemde producten zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik altijd eerst de gebruiksaanwijzing.

ST01700/22