

- Microvezeltechnologie
- Snel en zacht debridement
- Creëert een schoon wondbed en reinigt huid rondom wondomgeving
- Verwijdert ongewenste lagen zoals necrose en fibrine
- Absorbeert overmatig exsudaat
- Intacte huid blijft gespaard

Prontosan® Debridement Pad

VOOR MECHANISCHE VERWIJDERING VAN
ONGEWENSTE LAGEN IN EEN WOND

Prontosan® Debridement Pad

VOOR MECHANISCHE VERWIJDERING VAN ONGEWENSTE LAGEN IN EEN WOND


PRODUCTOMSCHRIJVING

De Prontosan® Debridement Pad is een druppelvormige pad met microvezels en een absorberende laag die in combinatie met Prontosan® wondreinigingsvloeistof wordt toegepast voor een effectieve wondbedvoorbereiding. De pad verwijdert ongewenste lagen, zoals verweekte necrose en fibrine en absorbeert overtollig exsudaat. Intacte huid wordt gespaard. Het reinigen van wonden met de Prontosan® Debridement Pad is zeer effectief en kan toegepast worden als mogelijk alternatief voor scherp debridement. Bijvoorbeeld bij wonden of situaties waarin scherp debridement niet mogelijk is.

Prontosan® Debridement Pad is uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik.

HET PRINCIPE VAN MICROVEZELS


Microvezels kunnen zich hechten aan zelfs de kleinste, microscopische deeltjes. Terwijl normale (groter qua structuur) een meer borstelend effect hebben. Als je de effecten zou visualiseren, zie je dat er sprake is van adhesieve krachten tussen microvezels en deeltjes. De Prontosan® Debridement Pad bestaat uit miljoenen microvezels waardoor het algehele reinigende oppervlakte enorm groot is. Weefselresten, exsudaat, fibrine en necrose kunnen door de microvezels eenvoudig uit de wond verwijderd worden.

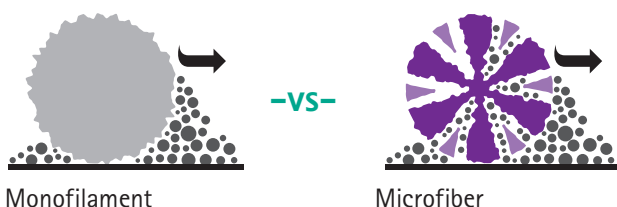

HOE GEBRUIK JE DE PRONTOSAN® DEBRIDEMENT PAD

Bevochtig de ongemarkeerde zijde van de pad met 15 - 20 ml Prontosan® wondreinigingsvloeistof. Veeg de bevochtigde kant in een cirkelvormige beweging met lichte druk over de wond en/of aangrenzende huid.

Bij hardnekkige lagen in de wond: reinig de wond met Prontosan® wondreinigingsvloeistof en laat gazen gedrenkt in Prontosan® gedurende 10-15 minuten op de wond liggen. Indien de wond niet groter is dan de Prontosan® Debridement Pad, mag ook de met Prontosan® bevochtigde pad op de wond worden aangebracht gedurende 10-15 min.

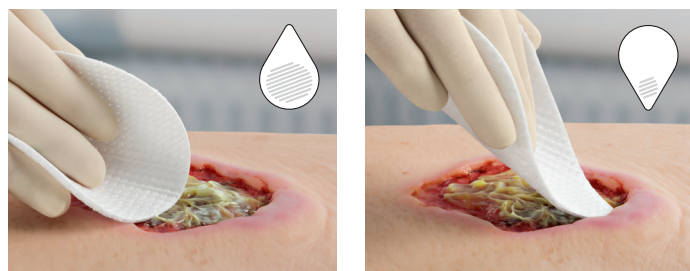

Na debridement is het raadzaam om de wond grondig te irrigeren met Prontosan® wondreinigingsvloeistof en dan pas door te gaan met de standaardbehandeling.

Verpakking	Artikelnummer	Z-Indexnummer
Doos à 3 stuks	3908456	16592816
Doos à 10 stuks	3908457	16592808

Compositie

De reinigende laag bevat polyester en polypropyleen microfiber. De bovenzijde is een polypropyleen laag.

KENMERKEN

- Goede reiniging en debridement dankzij microvezeltechnologie
- Zacht debridement, geen weefselbeschadiging
- De unieke druppelvorm zorgt dat ook moeilijk te bereiken holtes en oppervlakten gereinigd worden
- Handige blisterverpakking om veilig en aseptisch inweken van de pad voorafgaand aan gebruik mogelijk te maken